
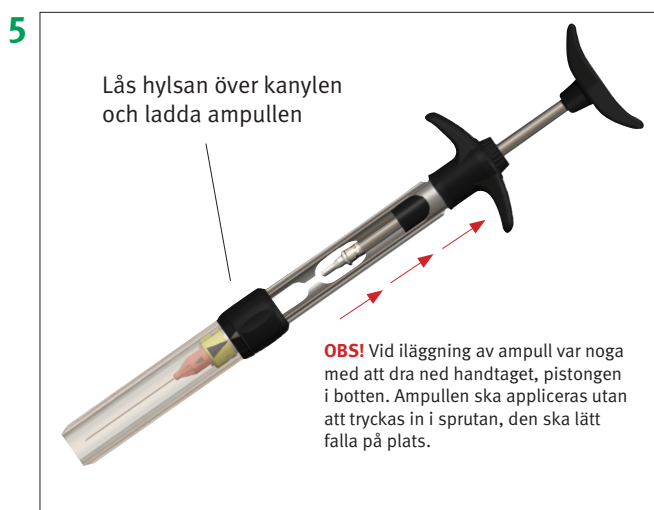


# In Safe injektionsspruta


- Specialutvecklad injektionsspruta, självspirerande som förebygger risken för stickskador.
- Ett system med kanylbehållare som helt eliminerar kontakt med kanylen.

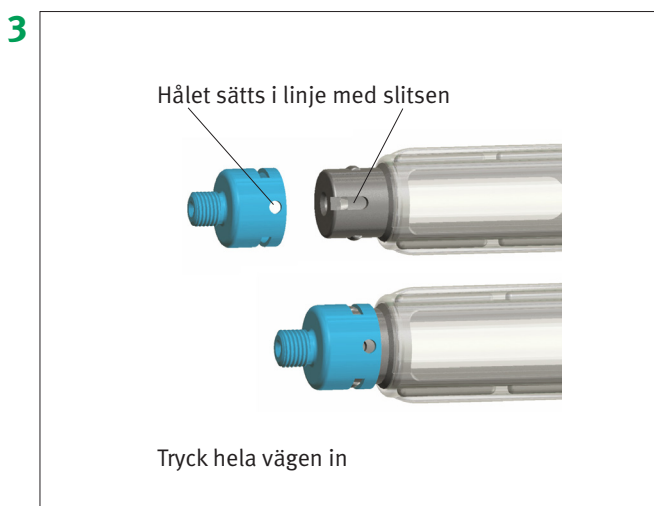


**Uppfyller kraven**  
enligt Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter  
AFS 2012:07 som trädde i kraft 1 maj 2013

6

För att ta bort kanylen – för in skyddshylsan på sprutan i behållaren.

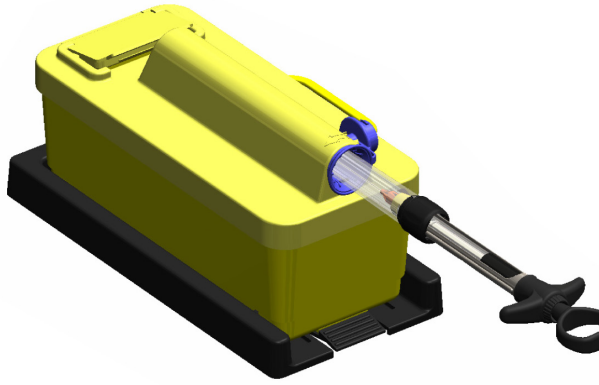



När den svarta kragen kommit in i hylsan, vrid ett kvarts varv motsols i pilens riktning. Tryck sedan sprutan till dess att det tar stopp.

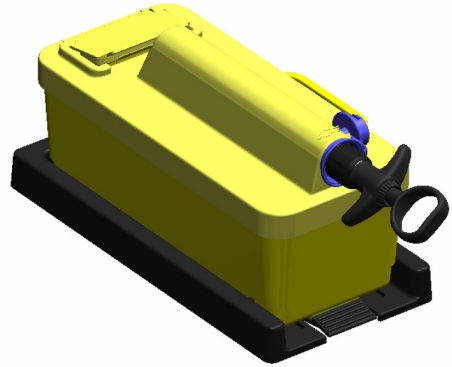

7

8

Grip handtaget och dra bakåt för att frigöra kanyl och adapter

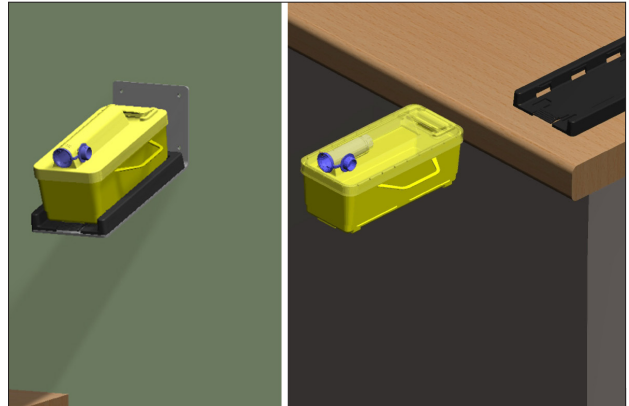
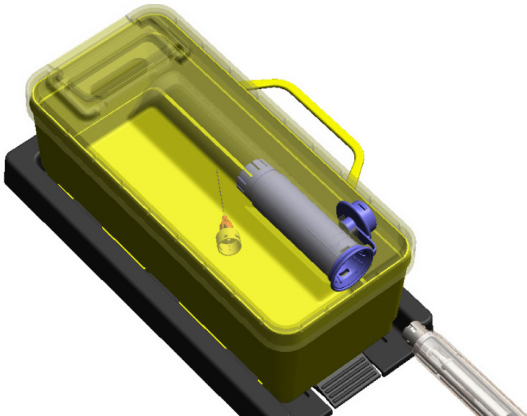


Behållaren kan vägg- eller bordsmonteras

9



10

Byte av hylsa

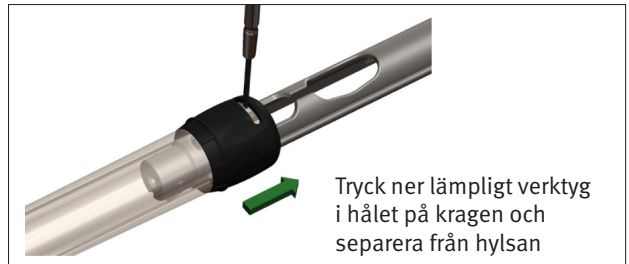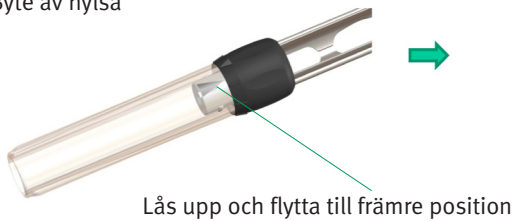

11

12

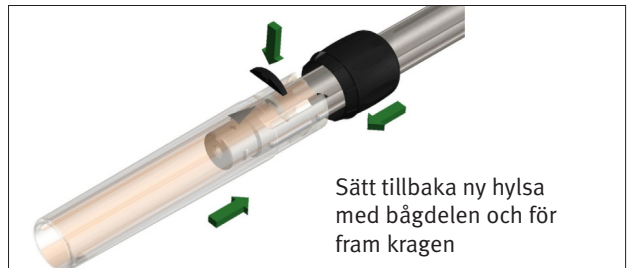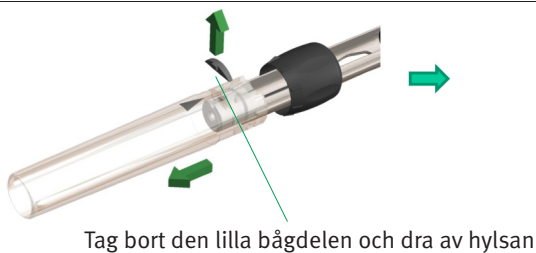

13

Spruta med T-trycke	_____ st	_____	500 220
Spruta med Ring-trycke	_____ st	_____	500 221
Blå adapter för mm-gänga	_____ 250 st	_____	500 222
Gul adapter för tum-gänga	_____ 250 st	_____	500 223
Kanylbehållare	_____ st	_____	500 224

Bordsfäste till behållare	_____ st	_____	500 225
Fästkudde	_____ fp	_____	500 226
Skåpfäste	_____ st	_____	500 227
Väggfäste	_____ st	_____	500 228
Skyddshylsa	_____ 2 st	_____	500 229